



LIFEVAC EUROPE LTD

Tervetuloa LifeVacin käyttäjäksi



LIFEVAC-TIETOA JA KÄYTTÖOHJE



Sisältö

1. Tietoa tuotteesta	2
2. Näin LifeVac toimii	4
3. Käyttöohje	5
4. Vältä tukehtumistilanteet	6

Tietoa tuotteesta

Käyttötarkoitus

LifeVac-vierasesineenpoistaja on tukehtumassa olevan henkilön hengen pelastamiseksi tarkoitettu laite, jota voidaan käyttää, kun muut pelastustoimenpiteet eivät tuota tulosta. Toistaiseksi saatavilla ei ole muita tukehtumaisillaan olevan henkilön hengen pelastamiseksi tarkoitettuja apuvälineitä. LifeVac-laitetta on helppo käyttää ja se voi olla ainoa hengenpelastuskeino tilanteessa, jossa perinteiset ensiaputoimenpiteet eivät tuota toivottua tulosta.

Yleisiä ohjeita

Säilytä LifeVac-laite huoneenlämmössä. Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa. Älä säilytä sitä myöskään autotallissa tai muussa vastaavassa paikassa, jossa suuret lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa muutoksia laitteen toimintaan. Laite sopii säilytettäväksi hyvin esimerkiksi keittiön kaapissa.

Toimitus

Tarkista, että LifeVac-laitteen pakkauksen mukana tulee seuraavat tarvikkeet: kaksi maskia aikuiselle ja yksi pienempi maski, LifeVac-laite, ohjekirja ja käyttöohje. Tarkista, ettei laitteessa ole repeämiä tai muita vikoja. Jos havaitset tuotteessa puutteita tai virheitä, ota välittömästi yhteys Tammediin tuotteen vaihtoa tai hyvitystä varten. Virheistä tulee ilmoittaa viikon sisällä tuotteen toimituspäivästä.

Ohjeita käyttäjälle

LifeVac-laitetta tulee käyttää, jos perinteisistä ensiaputoimenpiteistä, kuten selkään läimäytyksistä tai Heimlichin otteesta ei ole apua. LifeVac-laite on tarkoitettu käytettäväksi vain vierasesineen aiheuttamassa tukehtumistilanteessa olevalle potilaalle. LifeVacia ei saa käyttää, jos potilas hengittää itse. LifeVac on tarkoitettu käytettäväksi vain ihmisille. Sitä saa käyttää vain kasvoilla. Älä käytä, jos potilas on yliherkkä muoville. LifeVac-laite ei sisällä lateksia. LifeVacia ei tule käyttää alle 18 kg painaville potilaille, koska laitetta ei ole testattu sitä kevyemmillä potilailla. LifeVacia ei tule käyttää potilaalle, jolla on intubaatioputki. Avaamattoman maskin säilyvyysaika on 36 kk.

Riskit

LifeVac ei takaa potilaan pelastumista. Tutustu maskin mukana tulevaan ohjeeseen ja tuotteeseen ennen hätätilannetta. Käyttäjä vastaa tuotteen käytöstä. LifeVac ei vastaa tuotteen käytön seurauksena tulleista vahingoista ja/tai kuolemantapauksista. Tuotteen käyttö voi aiheuttaa myös mustelmia kasvoissa tai yskää. Tuotteen käyttöön liittyy myös pieni ilmarinnan riski. Näiden riskien minimoimiseksi noudata LifeVacin ohjeita ja käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti. Katso lisätietoja ja ohjevideoita osoitteesta www.lifevac.fi.



Lue kaikki dokumentit ennen käyttöä



Tuote ei sisällä lateksia



Ei saa käyttää uudelleen



Älä altista suoralle auringonvalolle



Käsittele varoen

LifeVac - käyttöohje

Noudata yleisiä ensiapuohjeita ja soita 112



Kiinnitä sopivan kokoinen maski LifeVac-laitteeseen kiertävällä liikkeellä.
Varmista, että maski on kunnolla kiinni laitteessa.



Laita maski suun ja nenän ympärille, kapea pää nenänvartta vasten.
Avaa samalla ilmatiet nostamalla leuankärkeä ylöspäin.



Pidä yhdellä kädellä maski tiiviisti kasvoja vasten.
**PAINA TOISELLA KÄDELLÄ KAHVA ALASPÄIN KOHTI KASVOJA,
VEDÄ KAHVA NOPEALLA LIIKKEELLÄ TAKAISIN YLÖS.**



Käännä potilas kyljelleen ja puhdista suu.
Tarkista, onko vierasesine irronnut, toista tarvittaessa.

JOS POTILAS EI HENGITÄ, ALOITA PAINELU-PUHALLUSELVYTYS

Vältä tukehtumistilanteet

Lapset

Pienen lapsen hengitystiet ovat halkaisijaltaan suunnilleen lapsen pikkusormen kokoiset. Lapsen nielemisrefleksi ja hampaat eivät ole täysin kehittyneet, joten esimerkiksi suurten ruuanpalojen paloittelu pureskelemalla voi olla heille vaikeaa.

Tukehtumistilanteiden välttäminen lapsilla

Aikuisen tulee aina valvoa lapsen ruokailua. Lapsen tulee istua suorassa ja syödä ikäiselleen sopivia ruoka-aineita.

Myös ravintorikkaat ja lapselle hyödylliset ruoka-aineet voivat hankalan muotoisina paloina olla vaarallisia. Tavanomaisia kurkkuun juuttuvia ruoka-aineita ovat mm. makkara, popcorn, tikkarit, makeiset, pähkinät ja siemenet, kuivatut hedelmät ja muut ruoka-aineet, joiden nieleminen voi olla vaikeaa ilman kunnollista pureskelua.

- Lapsen ei tule syödä silloin kun hän juoksee, leikkii tai matkustaa esimerkiksi autossa.
- Kasvikset tulee keittää ja paloitella ennen niiden nauttimista.
- Leikkaa makkara ensin pituussuunnassa ja paloittele sitten sivusuunnassa, jotta palat ovat riittävän pieniä.

Aikuiset

Tukehtuminen on kolmanneksi tavallisin kuolinsyy yli 75-vuotiailla ja tavallisin noin 85-vuotiailla. 89-vuotiailla tukehtuminen on toiseksi tavallisin kuolinsyy. Vaikka ruokaa ei pureskeltaisi kunnolla, tavallisin tukehtumisssyy on liian nopea syöminen ja alkoholin nauttiminen syömisestä yhteydessä. Tiedetut sairaudet, kuten ALS-tauti, aivoverenkiertohäiriöt tai Alzheimerin tauti, voivat myös kasvattaa tukehtumisriskiä.

Tukehtumistilanteiden välttäminen aikuisilla

Muutamit yksinkertaiset neuvot voivat estää sinun tai läheisesi tukehtumisen. Näihin kuuluu esimerkiksi ruuan pureskelu huolellisesti, erityisesti jos käytät hammasproteesia. Vältä myös nauramista tai puhumista syödessä.

Ohjeita tukehtumisen välttämiseksi aikuisilla:

- Istu suorassa tuolilla tai nojatuolissa.
- Paloittele syötävät palaset sopivan kokoisiksi, jotta ne on helppo purra ja niellä. Vältä syömistä ähkyyn asti.
- Nauti ruokaa ja juomaa vuorotellen, ei yhtä aikaa.
- Ota ruokaa suuhun vähän kerrallaan.
- Valitse sopiva ruuan määrä ja palojen koko jokaiselle yksilöllisesti.

Valmistaja:



LifeVac Europe Ltd, Carnanton, King Street, Combe Martin,
Devon EX34 0AD, UNITED KINGDOM. www.lifevac.eu Puh:
+447599210161

Maahantuoja:



Tammed Oy

Erkkilänkatu 11 A, 33100 Tampere • Puh. (03) 2606 530
myynti@tammed.fi • www.tammed.fi